


■ Quick aid の効果

乾燥・除湿効果

外気環境／温度25℃・湿度55%RH

— Quick aid 湿度 (%RH)
— 従来品 (シリカゲル入乾燥ケース)

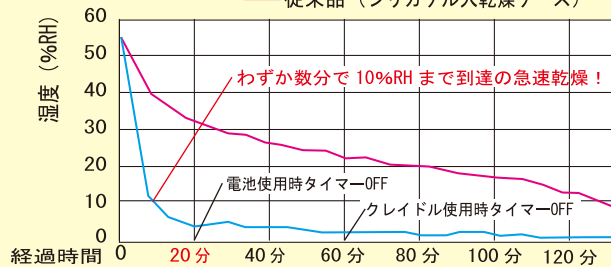


※20分到達時約5%RHの超低湿環境。

クイックエイドは特殊な乾燥剤とケース内の循環ファンにより、周囲の温度と同じ状態で、水分だけを急速に除湿・乾燥させます。またヒーターなどの熱を使わずに乾燥できるので、補聴器に熱ストレスを与えることなく、効果的でやさしい乾燥が可能となります。

除菌効果

Staphylococcus epidermidis
(表皮ブドウ球菌) の試験結果

免疫力低下により、炎症や化膿など人体に悪影響をおよぼす細菌

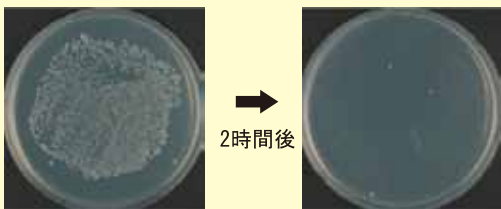


2時間後には99.9%以上死滅

本体に搭載されている紫外線LEDとハイブリッドシートが融合されることで、補聴器の表面についた雑菌を除去します。また、クイックエイドの運転(紫外線LED消灯)が終わっても、効果こそ弱まりますが、除菌する効果は継続されますので、次回装用される時まで衛生状態が保たれます。

脱臭効果

— n-酪酸 (体臭、汗の臭い)
— イソ吉草 (むれた足の臭い)

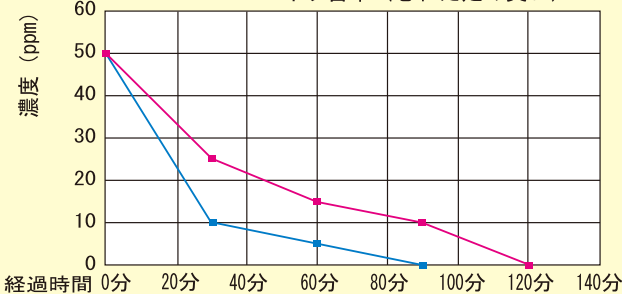

クイックエイドはハイブリッドシートの効果で、気になる汗の臭いや、蒸れた足の臭いなどを、強力に脱臭します。これで周りの人を気にしなくても安心して気持ちよく装用になります。また、他にもタバコの臭いやアンモニアなどの化学物質を軽減させる効果もございます。
注) グラフのように、数値上で脱臭の効果は確認できますが、臭覚が敏感な方によっては、わずかな臭いでも感じられる場合がございます。

こんなに
便利！

Quick aid (クイックエイド) は
あなたの補聴器ライフをサポートします。

● ボタン1つで簡単操作。

ONボタンを1回押すだけ！スイッチが入ると約20分間(電池使用時)、素早く乾燥・除菌・脱臭を行います。更に、電源OFF後も効果は継続されるので、装用する時には気持ちよくご利用になれます。



● コンセントが不要！ ご旅行やお出掛けも安心。

本体は単4電池2本で動作するので、コンセントの異なる海外旅行にも携帯出来、コンパクトで軽いため、持運びもらくらく♪



● 紛失・破損などの心配無し。

クイックエイドに入れて、毎日決まった場所に保管すれば、紛失することもなければ、過って踏んづけたり、小さなお子様やペットにいたずらされて破損することも軽減できます。



Quick aid (クイックエイド) の収益の一部は「NPOヒアリングインターナショナル」へ寄付され、国内外の子供たちの先天性難聴の早期発見や難聴予防など、NPO/NGO活動に役立てられます。

IDEX株式会社

〒231-0058 横浜市中区弥生町2-18-1 ロイヤルステージS,T 4F
TEL : 045-341-0355 FAX : 045-262-1061
URL : <http://www.idex06.jp> E-mail : Info@idex06.jp

◆詳しくは、下記専用ホームページでご紹介しています。

www.Quickaid.jp

●商品のご寿命は当店まで

- ご利用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用下さい。
- 製品デザイン・仕様は改良その他により、予告無しに変更する場合がございます。
- 製品の色は印刷の為、実物と異なる場合がございます。●希望小売価格は税込価格で表示しています。
- Quick aid は I D E X 株式会社の登録商標です。

高性能補聴器乾燥器

クイックエイド

スピード
乾燥

クリーン
除菌

パワフル
脱臭



クイックエイド
Quick aid

これ1台で補聴器管理がOK!

IDEX

汗と湿気は補聴器故障の原因！



■ Quick aid (クイックエイド) とは

1. 汗や湿気などで湿った補聴器を**素早く乾燥**させ
2. 補聴器の表面についた雑菌を**キレイに除菌**し
3. いやな臭いをも**強力に脱臭**する

大切な補聴器と永く上手につきあうために商品化された補聴器専用の乾燥器です。

簡単キャップ開閉



■ 空気電池置きに便利なマグネットシート付

クイックエイドは乾燥効果が高い為、補聴器に空気電池を入れたままご利用になりますと、空気電池の寿命に影響を及ぼす場合がございますので、ご面倒でも本体天面のマグネットシートに置いてご利用ください。

■ 本体 (電池使用時)


- ・運転時間: 約20分で自動OFF。
- ・電池寿命: 1日1回のご利用で約30日。

注) 新品のアルカリ電池を使用した場合。

■ クレイドル (AC電源使用時)

- ・運転時間: 約1時間で自動OFF。
- クレイドル使用時は、本体に電池が入っていてもクレイドル (AC電源) が優先になります。

■ 本体 QA-150F 希望小売価格 4,980円
写真: 別売のクレイドル (電源供給装置) に設置

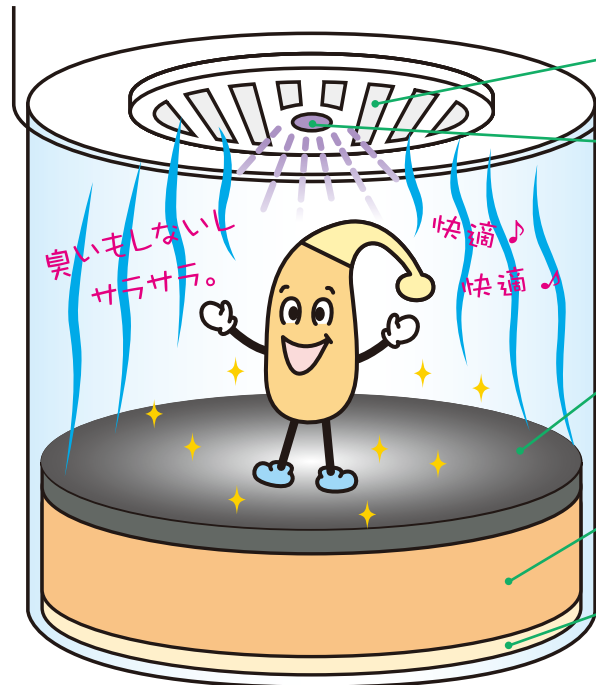

● 循環ファン

ケース内の空気を循環させて補聴器の表面をやさしく乾かせます。特殊乾燥剤と融合することで、乾燥効率が大幅アップ。

● 紫外線LED

蛍光管と比べ長寿命で省エネの為、環境にやさしい材料です。ハイブリッドシートと融合することで、除菌効果が大幅アップ。

● ハイブリッドシート

活性炭や水酸化チタン、または極微量のヨウ素などが配合されたクイックエイド専用開発された複合素材。


注) ヨウ素アレルギーの方は医師にご相談ください。

● 特殊乾燥剤

一般的なシリカゲル剤と比べ水分を素早く吸着させる特徴があり、補聴器の湿気対策にもっとも適した乾燥能力の高い乾燥剤です。

● 湿度検知紙

乾燥剤の交換目安に最適。ピンク色になると交換をお知らせ。

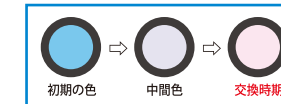

交換目安は2ヶ月に1度ですが季節により変化が異なる場合がございます。

■ 本体 QA-150F 希望小売価格 4,980円



外形寸法: 直径74mm×高さ84mm
質量: 約185g

単4アルカリ乾電池2本で、簡単に乾燥と除菌・脱臭が実現できます。電池を入れ、約20分後に自動的にタイマーが切れるので操作も簡単。バッグなどに入れて持ち運びもできるコンパクトな商品です。別売のクレイドル (電源供給装置) と一緒に使用することで、さらに便利。

■ クレイドル (電源供給装置) QAC-70 希望小売価格 2,880円



外形寸法: 直径70mm×高さ60mm
質量: 約40g (ACアダプター含まず)

乾電池での運転とは別に、ご家庭のコンセントから電源供給が可能の為、電池の消耗を気にすることなくご利用になれます。

頻繁にクイックエイドをご使用される方はクレイドルでのご利用をおすすめいたします。

100回のご利用でも電気代約1円の省エネ!

※ クレイドルは電源を供給するのみで、充電する機能はございません。(仕様内容は仕様欄に表記)

■ クイックエイド専用消耗品 QDH-601 希望小売価格 580円



セット内容 (日本製)

- 特殊乾燥剤/ハイブリッドシート/湿度検知紙 (各1)

消耗品は2カ月に一度の目安でご交換をおすすめいたします。

注) クイックエイドの (乾燥・除菌・脱臭) 効果を得る為には、必ずQDH-601クイックエイド専用消耗品 (特殊乾燥剤・ハイブリッドシート・湿度検知紙) 全てをお取替えのうえご利用下さい。

交換必要!

■ サービス部品



① マグネット付電池蓋
希望小売価格 580円



② クリアケース
希望小売価格 525円



③ ACアダプター
希望小売価格 1,050円

※ サービス部品につきましては、お取扱販売店にお問い合わせ下さい。