

こんなに
便利!

Quick aid (クイックエイド) は
あなたの補聴器ライフをサポートします。

IDEX

「大切な補聴器」だから守りたい。

高性能補聴器乾燥器

クイックエイド



素早い乾燥。除菌や脱臭効果もスゴイ!

Quick aid



QA-221W QA-221V QA-221P QA-221L QA-221G QA-221BK

補聴器の管理はクイックエイド

● **ボタン1つで簡単操作。**

ONボタンを1回押すだけ! スイッチが入ると約20分間(電池使用時)、素早く**乾燥・除菌・脱臭**を行います。更に、電源OFF後も効果は継続されるので、装着する時には気持ちよくご利用になれます。



● **コンセントが不要!**

ご旅行やお出掛けも安心。

本体は単4電池2本で動作しますので、コンセントの異なる海外旅行にも携帯出来て便利。
また、コンパクトで軽いため、持運びもらくらく♪



● **紛失・破損などの心配無し。**

クイックエイドに入れて、毎日決まった場所に保管すれば、過って踏んづけたり、小さなお子様やペットにいたずらされて破損することや紛失も軽減できます。



IDEX株式会社

〒231-0058 横浜市中区弥生町 2-18-1 ロイヤルステージ S.T 4F
TEL: 045-341-0355 FAX: 045-262-1061

URL: <http://www.idex06.jp> E-mail: info@idex06.jp

◆詳しくは、下記クイックエイドサイトでご紹介しています。

<http://www.quickaid.jp>

●商品のご用命は当店まで

- ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用下さい。
- 製品デザイン・仕様は改良その他により、予告無しに変更する場合がございます。
- 製品の色は印刷の為、実物と異なる場合がございます。●希望小売価格は税込価格で表示しています。
- Quick aid は I D E X 株式会社の登録商標です。●本カタログの内容は2014年4月現在のものです。

Quick aid

補聴器ライフのサポーター

いい「聞こえ」いつも。

毎日を最高の状態で。
大切な補聴器を一日も長く。

クイックエイドがお手伝いします。



クイックエイド
「3つの効果」

スピード
乾燥

クリーン
除菌

パワフル
脱臭

補聴器のために熱を使わない乾燥方式
電源が切れても装用するまで効果は持続

6COLORS

クリスタルホワイト



QA-221W

プリリアントパープル



QA-221V

ロゼピンク



QA-221P

ミントブルー



QA-221L

ライムグリーン



QA-221G

ロイヤルブラック



QA-221BK

正しい補聴器管理してますか？

過去に『汗や湿気』が原因で補聴器の聞こえが悪くなったり、故障して機能しなくなったり、そんなことはございませんか？

また、つい管理を怠ったばかりに、床に転がっていた補聴器を、過って踏んでしまったり、小さなお子様やペットにいたずらされて壊されちゃった。

…こんな経験はございませんか？



補聴器は1人1人に合せた大切な精密機器！

修理になると時間や手間は勿論、費用も大きくかかってしまいます。クイックエイドなら水分に弱い補聴器も素早く乾燥するので、汗や湿気による故障原因を抑制できます。

また、高い除菌と脱臭効果が得られることで、装用時はいつも清潔です。

1つでもあてはまったあなたに

- ✓ 決まった補聴器管理をしていない
- ✓ 汗をかきやすい体質や環境にいる
- ✓ 以前、汗や湿気による故障で修理をした
- ✓ 補聴器に付着した臭いや雑菌が気になる

クイックエイドがお役立てします！

Quick aid (クイックエイド) とは

1. 汗や湿気などで湿った補聴器を**素早く乾燥**
2. 補聴器の表面についた雑菌を**キレイに除菌**
3. いやな臭いをも**強力に脱臭**

『3つの効果』があなたの補聴器を強力サポート。

補聴器専用のクイックエイドだから、補聴器を汗や湿気から守るだけでなく、紛失や破損の心配も解消できる最適な管理商品です。

クイックエイドの 特徴1 High Speed

素早い乾燥

乾燥効果


乾燥能力の高い特殊乾燥剤と 本体搭載の循環ファンで素早く乾燥

クイックエイドの乾燥剤は一般的なシリカゲル剤と異なり、空気中の水分を素早く吸着させる特殊な乾燥剤を用いています。この高性能な乾燥剤に本体搭載の循環ファンを利用することでケース内の空気(湿気)を強制的に拡散させ、より素早く乾燥させます。(一般的な自然乾燥ケースと比べ、3~5倍のスピード乾燥) また、ヒータなどの熱を使用しない乾燥方式の為、補聴器に与える熱ストレスもなく、安全で効果的な乾燥ができます。



外気環境 / 温度25°C・湿度55%RH

— Quick aid 湿度 (%RH)
— 従来品 (シリカゲル入乾燥ケース)

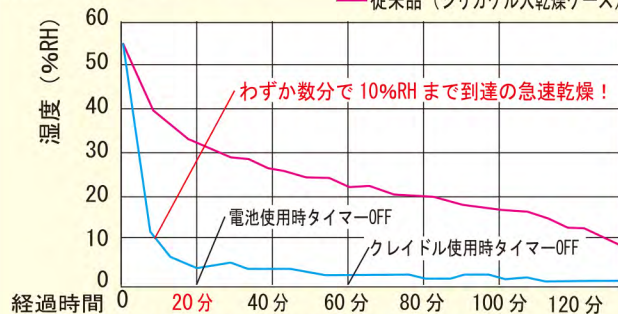

※20分到達時約5%RHの超低湿環境。

クイックエイドの 特徴2

Clean

清潔に除菌



除菌効果

紫外線LEDとハイブリッドシートの効果で 補聴器の表面についた雑菌をキレイに除菌


蛍光管と比べ長寿命で環境にやさしいLEDタイプの紫外線(紫外線LED:波長375nm)とクイックエイド専用に開発された特殊なハイブリッドシート(活性炭・水酸化チタンなどが配合された不織布素材)の効果で補聴器の表面に付着した雑菌(外耳炎の原因とされる細菌)を除菌します。

したがって免疫力の弱い小さなお子様や、お年寄りの方でも炎症を予防でき、清潔で気持ちよく装用できます。



Staphylococcus epidermidis (表皮ブドウ球菌)の試験結果

免疫力低下により、炎症や化膿など人体に悪影響をおよぼす細菌

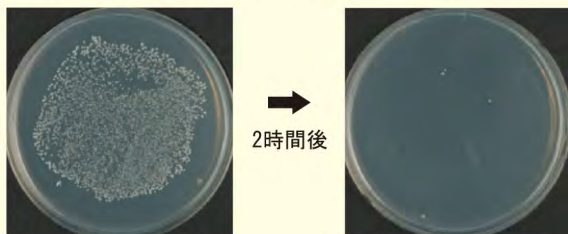

2時間後には99.9%以上死滅

※外耳炎の原因の一つである緑膿菌に至っては100%死滅。

クイックエイドの 特徴3

Powerful

強力に脱臭




脱臭効果

専用に開発された特殊ハイブリッドシートの 効果で気になる臭いも強力に脱臭

ハイブリッドシートの効果で補聴器に付いた体臭や汗などの臭いを強力に脱臭します。これによりいやな臭いを軽減でき、周りの方に気にすることなく安心して気持ちよく装用できます。

※乾燥効果と同様にクイックエイドに入れる前には、補聴器を乾いた布などで拭いてからご利用いただくと更に効果的です。

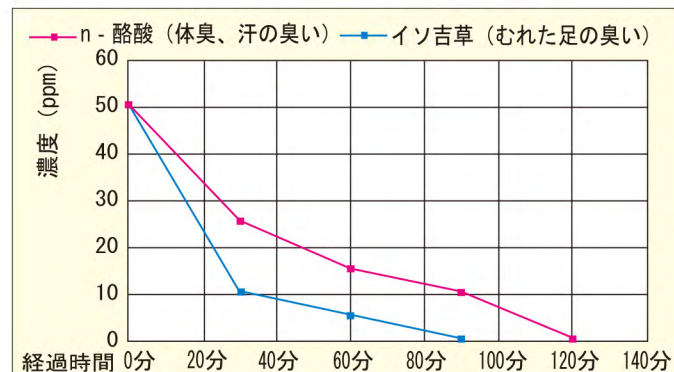

他にもタバコの臭いやアンモニアなどの化学物質を軽減する効果もございます。

注) グラフのように数値上での脱臭効果は確認できますが、臭覚が敏感な方によっては、わずかな臭いでも感じられる場合がございます。

汗と湿気は補聴器故障の原因!

素早い乾燥で汗や湿気をシャットアウト

クイックエイドの機能

● 循環ファン

ケース内の空気を循環させて補聴器表面をやさしく乾かせます。特殊乾燥剤と融合することで、乾燥効果がアップ。

● 紫外線LED

蛍光管と比べ長寿命で省エネの為、環境にやさしい材料です。ハイブリッドシートと融合することで、除菌効果が大幅アップ。

● ハイブリッドシート

活性炭や水酸化チタン、ごく微量のヨウ素などを配合し、クイックエイド専用開発された複合素材です。


注) ヨウ素アレルギーの方は医師にご相談ください。

● 特殊乾燥剤


一般的なシリカゲル剤と比べ水分を素早く吸着させる特徴があり、補聴器の湿気対策にもっとも適した乾燥能力の高い乾燥剤です。

● 湿度検知紙

乾燥剤の交換目安に最適。ピンク色になると交換をお知らせ。

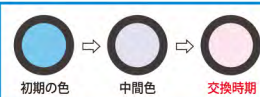

交換目安はおよそ2ヶ月に1度ですが、季節により変化が異なる場合がございます。

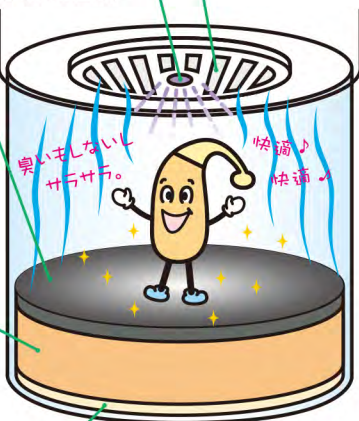

クイックエイドの仕様

■ 簡単キャップ開閉

■ 空気電池置きに便利なマグネットシート付

クイックエイドは乾燥効果が高い為、補聴器に空気電池を入れたままご利用になりますと、空気電池の寿命に影響を及ぼす場合がございますので、ご面倒でも本体天面のマグネットシートに置いてご利用ください。



■ 本体（電池使用時）

- ・運転時間：約20分で自動OFF。
 - ・電池寿命：1日1回のご利用で約30日。
- 注) 新品のアルカリ電池を使用した場合。

■ QA-221W 希望小売価格 8,080円
(税抜7,482円)

■ クレイドル（AC電源使用時）

- ・運転時間：約1時間で自動OFF。
- クレイドル使用時は、本体に電池が入っていてもクレイドル（AC電源）が優先になります。

電源ONで、あとは機械が自動的に運転。



補聴器の管理はこれ1台でOK!

商 品 仕 様

品 番	本 体 ・ ク レ イ ド ル (電 源 供 給 装 置) セ ッ ト						本 体	ク レ イ ド ル
	QA-221W	QA-221BK	QA-221L	QA-221V	QA-221G	QA-221P		
写 真								
希 望 小 売 価 格	8,080円 (税抜 7,482円)						5,120円(4,741円)	2,960円(2,741円)
外 形 寸 法	本体: 直径 74mm × 高さ 84mm クレイドルセット: 直径 74mm × 高さ 98mm						直径 74mm 高さ 84mm	直径 70mm 高さ 60mm
質 量	本体: 約 185g クレイドルセット: 約 225g						約 185g	約 40g
電 源	AC100V 50-60Hz / 単4形乾電池×2本(別売)						※アルカリ又はニッケル水素電池(充電電池)をご利用ください	
電 池 寿 命	1日1回のご使用で約1ヶ月						(新品アルカリ電池使用時)	
OFFタイマー時間	乾電池使用時: 約20分/回 クレイドル使用時: 約60分/回							
生 産 国	中国/日本(主要部品)						(UV-LED,ハイブリッドシート,特殊乾燥剤,湿度検知紙)	
乾 燥 方 式	ケース内循環ファン +						特殊乾燥剤	
除 菌 方 式	紫外線LED +						ハイブリッドシート	
脱 臭 方 式	ハイブリッド						シート	
付 属 品	クレイドル(電源供給装置) 1個 ハイブリッドシート 1枚 特殊乾燥剤 1個 湿度検知紙 1枚 取扱説明書 1部						ハイブリッドシート 1枚 特殊乾燥剤 1個 温度検知紙 1枚 取扱説明書 1部	ACアダプター-1個 取扱説明書 1部

※本体及びクレイドルの単体取扱いはクリスタルホワイトのみです。

■クイックエイド専用消耗品 QDH-601 希望小売価格 590円(税抜547円)

セット内容：特殊乾燥剤/ハイブリッドシート/湿度検知紙(各1)




交換
必要!

日本製

クイックエイドを1日1回のご利用の場合、消耗品のご交換目安は約2ヶ月に一度となります。但し、ご利用回数や季節、ご使用環境及び個人差により消耗の変化が異なりますので、湿度検知紙にて確認頂き、正しくお取り替えてください。

注) クイックエイドの(乾燥・除菌・脱臭)効果を得る為には、必ずQDH-601クイックエイド専用消耗品(特殊乾燥剤・ハイブリッドシート・湿度検知紙)全てをお取替えのうえで使用ください。

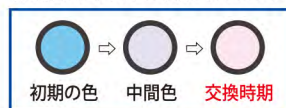

※ピンク色になると交換をお知らせ。

■お得な3個パック(クイックエイド専用消耗品セットQDH601×3)

希望小売価格 1,620円(税抜1,500円)

サービス部品



■マグネット付電池蓋
希望小売価格 590円
(税抜 547円)



■クリアケース
希望小売価格 540円
(税抜 500円)



■ACアダプター
希望小売価格 1,080円
(税抜 1,000円)

※サービス部品につきましては、お取扱販売店にお問い合わせください。

使用方法について

- ① 本体(乾電池)でご使用になる場合
乾電池(単4アルカリ、充電電池)2本で簡単に乾燥と除菌・脱臭が実現。
電池での使用は1日1回で約30日間ご利用になれます。
- ② クレイドル(電源供給装置)でご使用になる場合
乾電池の交換が面倒な方、大半を決まった場所で保管している方や、頻繁にクイックエイドをご使用される方に便利でおすすです。
100回のご利用でも電気代約1円の省エネ!
※クレイドルは電源を供給するのみで、充電する機能はございません。