

正しい補聴器管理していますか？

クイックエイドプラスとは
今、お使いの普通の乾燥ケースに取り付けるだけで
強力な乾燥器になる優れものです。

クイックエイドプラスはココがスゴイ！

- ① 乾燥剤+風の相乗効果により、素早く乾燥
- ② 熱を使わないので毎日使っても補聴器にやさしい
- ③ 密閉されているので電源が切れても乾燥効果が持続

「トラブルの軽減」や「いい聞こえ」には、
素早く乾燥させることがポイント

サイクロン式のファン(風乾燥)で 補聴器を素早く乾燥



※ケース内の気流イメージ

本体に搭載されたサイクロン式のファン(風乾燥)が、乾燥剤の吸着効率を高め、湿った補聴器の表面を素早く乾かすと同時に、補聴器の内部まで**しっかり乾燥**させます。

日本メーカー製 高性能モーター搭載



Quick aid⁺

クイックエイドプラス


仕様 ※本体のみでケースは付属されておりません

品名	補聴器乾燥器 クイックエイドプラス	電源	単4アルカリ乾電池×2本(別売)
型番	QA-31F	付属品	クッションシート×1枚、取扱説明書(保証書付)
寸法	直径74mm×高さ37mm		
質量	約70g(乾電池含まず)		

強力な乾燥剤

クイックエイド消耗品セット(QDH-602)


強力な乾燥に加え、除菌と脱臭の効果もあります。

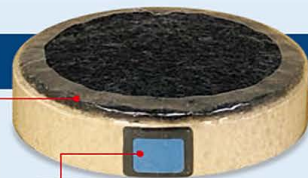

ピンク色になったら交換時期。
交換目安は約2か月です。
(季節や個人差によります)

透明フィルムでバックされており、
ケースが汚れません。

補聴器乾燥器 クイックエイド 消耗品セット(QDH-602)

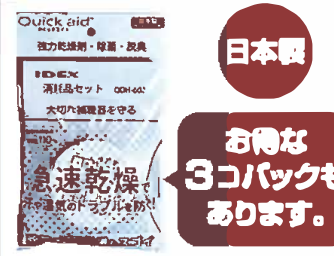

ひとつになって手間いらず！

ハイブリッドシート	強力乾燥剤	湿度検知紙

【お問合せ】

IDEX 株式会社

TEL **045-341-0355**

受付時間 10:00~17:00(土・日・祭日 定休日)

〒231-0068

神奈川県横浜市中央区弥生町2-18-1

ロイヤルステージS.T.4F

FAX:045-262-1081

https://www.quickaid.jp

クイックエイド

商品のご利用は当店まで

今お使いの

普通の乾燥ケースに付けるだけ!
強力な電気式乾燥器になります

キャップ式
電気乾燥器



サイクロン方式で
強力乾燥!

※設置イメージ

IDEX

電池式補聴器乾燥器本体

Quick aid+

クイックエイドプラス



こちらから動画で
風乾燥が
ご覧になれます

型番 QA-31F
(クリスタルホワイト)
※ケースは付属されておりません

価格 オープン

プラスして強力乾燥

素早く、強力乾燥で
汗や湿気をシャットアウト!

乾燥剤 + 風 **W** 乾燥で
補聴器を守る!

✓ 速乾

スピード乾燥
20分 自動タイマーオフ

✓ 安心

熱を使わない
風乾燥

✓ 長持ち

アルカリ電池2本で
約5ヶ月動作

取付け可能な補聴器乾燥ケース

クイックエイドプラスは、大半の補聴器用乾燥ケースにご使用できます。

○ 使えます

2022年現在



その他「コルチトーン社製」「バーナフォン社製」で提供の乾燥ケースにもご利用になれます。

※取付けがスムーズでない補聴器乾燥ケースもあります。

○ご不明な場合は、お取扱店舗およびIDEX(株)までお問合せください。

○各社で提供の乾燥ケースのデザイン・仕様は、改良その他により予告なく変更される場合がございます。

クイックエイドプラスの使い方

例えば、シリカゲル入り乾燥ケースをご利用の場合

1 今お使いの乾燥ケースのキャップを、本機に付け替える

キャップを
取外す

本機QA-31Fを
取付ける



2 これで、電気式の強力乾燥器に

スピード乾燥
20分

運転ランプ

通常、運転時は約20分間点灯します。
電池残量が少なくなると点滅して交換をお知らせ。



乾燥スピード 比較データ

水1滴をプレートに垂らして評価


		開始前	20分後	40分後	90分後
A	普通のフタ + シリカゲル 入りのケース				
B	クイックエイドプラス + シリカゲル 入りのケース				

クイックエイドプラスを取付けると、50分も早く乾燥!

除湿スピード 比較データ

無負荷

外気環境 / 温度25°C・湿度65%RH

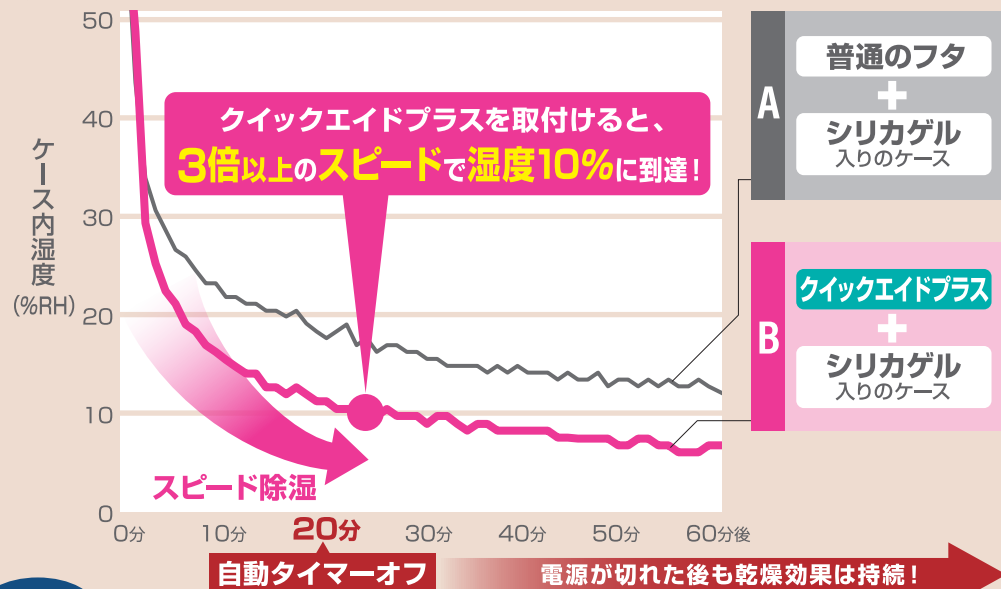

さらに

\\ シリカゲルより強力な乾燥剤 (QDH-602) \\

クイックエイドプラス + クイックエイド消耗品セット を使用した場合

「乾燥スピード」は、Aより70分も早く乾燥! 乾燥剤(QDH-602)

「除湿スピード」は、Aより10倍以上のスピードで除湿!



※データ測定: IDEX株式会社